

BrailleNote Touch+ de la HumanWare

Instrucțiuni simple în vederea utilizării

Partea superioară a dispozitivului are o **clapetă din nailon** care îl protejează, iar partea inferioară are o **carcasă de plastic dur** pentru siguranță.

Așază dispozitivul pe o masă, cu partea de plastic orientată în jos.

La atingerea celor **patru margini** ale Touch+, vei observa că clapeta din nailon este ținută închisă de **trei magneți**.

Asigură-te că **magnetul din mijloc este orientat spre tine**, acesta fiind situat pe marginea frontală a dispozitivului.

Ridică **cei trei magneți** pentru a deschide clapeta din nailon și a dezvălui **tastatura fizică**.

Conectarea cablului de încărcare

Introdu conectorul **USB-C** al cablului de încărcare în **portul USB-C** situat pe **marginea stângă** a BrailleNote Touch, aproape de **marginea din spate**.

Atenție: Nu este nevoie de forță excesivă. O conexiune forțată poate deteriora cablul sau dispozitivul BrailleNote Touch.

Conectarea și pornirea BrailleNote Touch+

1. Conectează cablul de încărcare:

Introdu conectorul **USB** al cablului de încărcare în adaptorul de alimentare, apoi conectează adaptorul la o priză de curent. **Folosește adaptorul furnizat** pentru o încărcare optimă.

2. Găsește butonul de pornire:

Butonul de pornire este **oval**, cu o **indentare**, situat pe **marginea stângă** a BrailleNote, lângă portul USB-C.

3. Pornirea dispozitivului:

Ține apăsat **butonul de pornire** timp de **aproximativ 3 secunde** pentru a aprinde BrailleNote Touch+.

4. Lansarea tutorialului:

După câteva minute, se va deschide **tutorialul automat**, care îți va prezenta cele mai utilizate funcții ale dispozitivului.

Dacă ești utilizator cu vedere, vei observa că, după pornirea BrailleNote pentru prima dată, apare **Google Startup Wizard** cu câteva secunde înainte de **tutorialul KeySoft**.

Nu atinge ecranul în timpul Google Startup Wizard, deoarece poate împiedica pornirea tutorialului KeySoft și astfel utilizatorul nu va putea învăța corect funcționalitățile dispozitivului.

După lansarea tutorialului **KeySoft**, BrailleNote Touch este **gata de utilizare**.

Navigarea în meniuri

□ Pentru a naviga printre elementele meniului, apasă **butonul dreptunghiular din extrema stângă (Previous)** și **butonul dreptunghiular din extrema dreaptă (Next)**, situate pe **marginea frontală** a dispozitivului.

□ **Activarea elementelor de meniu:**

Apasă unul dintre **butonale de rutare a cursorului (cursor routing buttons)**, situate **deasupra celulelor braille** de pe partea superioară a BrailleNote Touch. Aceste butoane au **o formă rotundă, ușor în relief**.

Pentru mai multe informații:

- Poți accesa **ghidul utilizatorului digital** din meniul **Options**, tastând **SPACE + O**, apoi activând **User Guide**.
- De asemenea, ghidul poate fi descărcat de pe: [HumanWare Support](#).

Specificații

- **Cerere de alimentare:** [+5VDC@2.4A](#) sau [+12VDC@1.5A](#)
- **Baterie:** Li-Polymer 3.7V nominal, 5100mAh
- **Interval de temperatură de operare:** 5 ~ 40°C
- **Interval de temperatură pentru încărcare:** 5 ~ 40°C
- **Temperatura de stocare:** -20 ~ 60°C
- **Umiditate de operare:** 5% ~ 90% (fără condens)
- **Umiditate de stocare:** 5% ~ 95% (fără condens)

Avertismente

Precauții privind siguranța bateriei

ATENȚIE:

- **Risc de explozie** dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect.
- **Elimină bateriile uzate** conform instrucțiunilor de mai jos.
- **Nu demonta și nu modifica bateria.**
- **Folosește doar încărcătorul specificat HumanWare.**

- **Există risc de supraîncălzire, incendiu sau explozie** dacă bateria este expusă la foc, lovită, pusă în contact cu apă sau dacă terminalele sunt scurtcircuitate.
- **Nu încerca să încarci sau să utilizezi bateria în afara unității.**

Instrucțiuni de eliminare

Componentele interne ale BrailleNote Touch trebuie eliminate conform **reglementărilor locale**. Dispozitivul nu conține materiale periculoase. Pentru eliminare, returnează-l către **HumanWare** sau respectă **procedurile locale de eliminare**.

Slotul pentru card SD

Nu introduce obiecte străine în slotul SD, ci doar carduri **SDHC** compatibile.

Declarație FCC / Industry Canada

Dispozitivul respectă normele **FCC Part 15** și standardele **RSS excepție de licență** Industry Canada.

Garanția producătorului

Dispozitivul este un produs de înaltă calitate, garantat împotriva defectelor de funcționare astfel:

- ☐ **SUA și Canada:** 1 an
- ☐ **Europa continentală și UK:** 2 ani
- ☐ **Australia și Noua Zeelandă:** 1 an
- ☐ **Alte țări:** 1 an

Garanția **acoperă toate componentele** (exceptând bateria) și **manopera**.